

*Simplicité d'usage  
= efficacité*

## Lingettes sans alcool

### Dispositif médical de classe IIb

Pour une désinfection rapide des sondes d'échographie endovaginales et rectales.



**ACTIF  
en 2 mn**

# CLEANISEPT® WIPES Forte Maxi

VIRUCIDE EN 14476 / SPORICIDE EN 13704 / BACTÉRICIDE EN 16615

- Universelles et faciles à utiliser
- Détergentes et désinfectantes
- Validées par la plupart des fabricants de sondes (PHILIPS, SAMSUNG, SIEMENS, SONOACE, SONOSCAPE, TOSHIBA, ZONARE, GE HEALTHCARE, HITASHI, MINDRAY)\*\*\*
- Spectre d'activité rapide (2 minutes)
- Spécialement adaptées pour une désinfection de surfaces de dimensions intermédiaires



## DESCRIPTION DU PRODUIT

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI sont des lingettes sans alcool, prêtes à l'emploi conçues pour la désinfection et le nettoyage sporicides et virucides des surfaces et des dispositifs médicaux, nécessitant un haut niveau de désinfection.

Les lingettes CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI prêtes à l'emploi sont adaptées aux surfaces de dimensions intermédiaires et peuvent être prélevées individuellement de l'emballage refermable particulièrement pratique.

## DOMAINES D'APPLICATION

Selon la loi sur les dispositifs médicaux (LDM) : pour la désinfection et le nettoyage de tous les dispositifs médicaux sensibles à l'alcool, **tels que des sondes d'échographie pour des examens transvaginaux et abdominaux.**

Selon le règlement sur les produits biocides (RPB) : pour la désinfection rapide et le nettoyage de tout type de surfaces et de matériels médicaux sensibles à l'alcool.

Spectre d'action	2 min		
<b>Bactéries et levures</b>			
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, levuricide)*	VAH**	conditions de saleté	•
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (essai à 4 zones, bactéricide, levuricide)*	EN 16615	conditions de saleté	•
Sporicide (Clostridium difficile)	EN 13704		•
<b>Virus</b>			
Efficace contre tous les virus enveloppés et non enveloppés (virucide)	RKI/DVV		•
Efficace contre tous les virus enveloppés et non enveloppés (virucide)**	EN 14476 / prEN 16777		•
Efficace contre les virus de la vaccine (MVA)	prEN 16777	essai orienté pratique (essai porte-germes)	•
Efficace contre les adénovirus	prEN 16777	essai orienté pratique (essai porte-germes)	•
Efficace contre les norovirus (NVM)	prEN 16777	essai orienté pratique (essai porte-germes)	•
Efficace contre les poliovirus / SV40 / papova / polyomavirus	RKI/DVV		•

\* y compris des essais de phase 2 niveau 1 et phase 2 niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais porte-germes)  
 \*\* Liste exhaustive sur [www.thxmedical.com](http://www.thxmedical.com)

Fabriqué par



Dr. Schumacher  
[www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

Importé en France par

THX MEDICAL SARL  
 125, Impasse du belvédère - 69280 Marcy l'étoile - FRANCE  
 Std: 00 33 04 78 87 17 99 - Fax: 00 33 4 78 87 16 98 - [info@thxmedical.com](mailto:info@thxmedical.com)

# CLEANISEPT® WIPES Forte Maxi

Lingettes sans alcool pour une désinfection rapide des surfaces et des dispositifs médicaux du type sondes d'échographie.

## SPECTRE D'ACTION

- bactéricide (incl. SARM)
- levuricide
- virucide selon RKI/DVV/EN 14476 (inclut les poliovirus, adénovirus, papovavirus/virus SV40, les virus de la vaccine, les norovirus ainsi que les virus VHB/VIH/VHC/de l'influenza et de la grippe)
- sporicide (Clostridium difficile)

## APPLICATION

Il convient de porter des gants adaptés lors de l'utilisation des lingettes CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI.

### Désinfection des surfaces

Essuyer les surfaces entièrement à l'aide de la lingette prête à l'emploi et laisser sécher.

### Désinfection des sondes d'échographie

Après ablation de la gaine protectrice utiliser une première lingette pour la détersion puis utiliser une seconde lingette pour la désinfection.

Laisser sécher.

### Utilisation

Jusqu'à 28 jours après ouverture

## COMPOSITION

100 g de solution d'imprégnation contiennent :

- 0,4 g de chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium
- 0,2 g de chlorure de didécyl diméthylammonium

## CONSIGNES PARTICULIÈRES

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. En cas de port de lentilles de contact, les enlever si possible. Continuer à rincer. Tenir hors de portée des enfants. Jeter les lingettes utilisées après utilisation dans les déchets ménagers.

## LISTES/STATUT DU PRODUIT

Les lingettes CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI figurent dans la liste actuelle des désinfectants de la VAH\* et sont répertoriés dans la liste IHO\* des virucides.

Les lingettes CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI sont conformes à la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

## INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Les produits de Dr. Schumacher GmbH sont fabriqués suivant des procédés modernes, sûrs et respectueux de l'environnement. Le respect de critères de qualité élevés permet de garantir une très bonne qualité de produit constante.

## RAPPORTS D'EXPERTS

### Dr. F. Brill, hygiéniste, Hambourg

Rapport d'experts sur la désinfection de surfaces conforme aux directives VAH.

### Dr. T. Koburger, hygiéniste, Greifswald

Rapport d'experts sur la désinfection de surfaces conforme aux directives VAH.

### Dr. J. Steinmann, virologue, Brême

Rapport d'efficacité contre les poliovirus, adénovirus, virus SV40 (papovavirus), virus de la vaccine et norovirus (MNV) selon la directive RKI/DVV les poliovirus, adénovirus et norovirus (MNV) selon la norme EN 14476 les adénovirus, virus de la vaccine (MVA) et norovirus (MNV) selon la norme prEN 16777

### Prof. Dr. H.-P. Werner, hygiéniste, Schwerin

Rapport d'efficacité sporicide (Clostridium difficile) selon la norme EN 13704.

\*VAH équivalent allemand de SF2H

\*IHO équivalent allemand de AFSSA

Produit	Conditionnement	Unité	Contenu	Dimensions	Réf.	
	CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI	Sachet souple	12	80 lingettes	env. 20 x 22 cm	00-235-T080
	CLEANISEPT FORTE MAXI	Sachet souple	18	10 lingettes	env. 20x22 cm	00-235-T010
	SUPPORT MURAL INOX pour 00-235-T080	Boite	1	NA	env.105x120 mm	1421265
	CLEANISEPT WIPES FORTE	Boite plastique	12	100 lingettes	env. 14x20 cm	00-235-D100
	SUPPORT MURAL INOX pour 00-235-D100	Boite	1	NA	env. 90x170 cm	00-902-DH



Utiliser les désinfectants avec précaution. Toujours lire les notices et informations produit avant usage.

Dr. Schumacher est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion de l'environnement validé en conformité avec l'EMAS et est membre de l'IHO, VCI, BAH, DGSV et auprès de DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

