

## Lingettes désinfectantes

> Lingettes sans alcool pour une désinfection rapide de tous types de dispositifs médicaux dont le matériel d'échographie : unités et sondes

Non adapté pour les sondes endocavitaires



**ACTIF**  
en 2 mn

# CLEANISEPT® WIPES MAXI & CLEANISEPT® WIPES

BACTÉRICIDE/LEVURICIDE EN16615, VIRUCIDE selon EN14476\*

\*sur virus enveloppés, papova/SV40

- Utilisation universelle, pratique et rapide
- Efficacité de base rapide
- Convient particulièrement à la désinfection de surfaces de taille moyenne au quotidien
- Particulièrement indiquées pour la désinfection des sondes d'échographie abdominales



### DESCRIPTION DU PRODUIT

CLEANISEPT WIPES MAXI sont des lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi sans alcool pour la désinfection et le nettoyage rapides des dispositifs et équipements médicaux ainsi que de tous types de surfaces au quotidien.

CLEANISEPT WIPES MAXI permettent notamment lors de la désinfection et du nettoyage des surfaces de taille moyenne une utilisation pratique et rapide. Elles sont sans alcool et ne comprennent ni aldéhyde ni phénol. Les lingettes sont prélevées individuellement de l'emballage pratique avec un couvercle refermable.

### DOMAINES D'APPLICATION

Selon directive dispositifs médicaux (DDM) : Convient à la désinfection rapide et au nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs résistants à l'alcool tels que les sondes échographiques abdominales.

Selon le règlement sur les produits biocides (RPB) : Désinfection rapide et nettoyage de tous types de surfaces et de matériels médicaux.

Spectrum et méthode d'essai			30 s	1 min	2 min
<b>Bactéries et levures</b>					
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, levuricide)*	VAH**/EN 16615	avec action mécanique, conditions de saleté		•	
<b>Virus enveloppés</b>					
Efficace contre tous les virus enveloppés	RKI/DVV	incl. HBV/HIV/HCV	•		
	EN 14476	virus de la vaccine, conditions de propreté	•		
<b>Virus non enveloppés</b>					
efficace contre les papovavirus/SV40	EN 14476	conditions de saleté			•
efficace contre les rotavirus	RKI/DVV		•		
<b>Expertises supplémentaires</b>					
bactéricide	EN 1040			•	
	EN 13727	conditions de saleté		•	
levuricide (C. albicans)	EN 1275			•	
	EN 13624	conditions de saleté		•	

\* y compris des essais de phase 2 niveau 1 et phase 2 niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais porte-germes orientés pratiques)

\*\* répertorié dans la colonne 5 min de la liste VAH

Fabriqué par



Dr. Schumacher  
www.schumacher-online.com

Importé en France par

THX MEDICAL SARL  
125, Impasse du belvédère - 69280 Marcy l'étoile - FRANCE  
Std: 00 33 04 78 87 17 99 - Fax: 00 33 4 78 87 16 98 - info@thxmedical.com

# CLEANISEPT® WIPES MAXI & CLEANISEPT® WIPES

Lingettes sans alcool pour une désinfection rapide des surfaces et des dispositifs médicaux

## RECOMMANDATIONS DU FABRICANT

Les lingettes Cleanisept Wipes Maxi sont recommandées pour la désinfection des échographes et des sondes d'échographie des fabricants suivants :

- Aloka GmbH, Meerbusch
- Esaote GmbH, Cologne
- Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden
- Philips Medizin Systeme GmbH, Hambourg
- Shimadzu Deutschland GmbH, Duisbourg
- Siemens Medical Solutions, Erlangen
- SonoAce GmbH, Marl
- Zonare Medical Systems GmbH, Erlangen

Les lingettes Cleanisept Wipes Maxi sont recommandées pour la désinfection des dispositifs médicaux des fabricants suivants :

- Cardinal Health, Allemagne
- Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach
- Schmitz & Söhne, Wickede
- Tomey/Eye Novation GmbH, Bielefeld

## ATTESTATIONS

Nos produits sont intégralement contrôlés. Sur demande, nous mettons à votre disposition les rapports de normes et dossiers d'experts.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu/récipient dans une entreprise de collecte agréée. Tenir hors de portée des enfants.

Pour usage professionnel seulement.

## UTILISATION

Essuyer les surfaces avec CLEANISEPT WIPES MAXI jusqu'au mouillage complet et laisser sécher pendant le temps d'action.

## COMPOSITION





100 g de solution d'imprégnation contiennent:  
- 0,25 g chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium,  
- 0,25 g chlorure de didécyl diméthylammonium

## DURÉE D'UTILISATION

Paquet ouvert : 3 mois.

\*VAH équivalent allemand de SF2H

\*IHO équivalent allemand de AFSSA

Produit	Conditionnement	Unité	Contenu	Dimensions	Réf.
 CLEANISEPT WIPES MAXI	Sachet souple	6	100 ling.	20x22 cm	TH-208-T100
 SUPPORT MURAL INOX pour 00-208-T080	Boîte	1	NA	env.105x120 mm	1421265
 CLEANISEPT WIPES	Boîte plastique	12	100 lingettes	env. 14x20 cm	00-208-D020
 SUPPORT MURAL INOX pour 00-208-D020	Boîte	1	NA	env. 90x170 cm	00-902-DH



Utiliser les désinfectants avec précaution. Toujours lire les notices et informations produit avant usage.

Dr. Schumacher est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion de l'environnement validé en conformité avec l'EMAS et est membre de l'IHO, VCI, BAH, DGSV et auprès de DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

