

## DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



Lingettes imbibées à base d'alcool pour la désinfection rapide des dispositifs informatiques et équipements médicaux sensibles en bloc opératoire et salles d'examen.

Lingettes en matériau biodégradable



PRESERVE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Utilisation universelle, pratique et rapide
- Efficacité complète
- Convient particulièrement à la désinfection de surfaces de taille moyenne dans des zones proches du patient

**DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** sont des lingettes à l'alcool prêtes à l'emploi, pour la désinfection et le nettoyage de surface de dispositifs médicaux, en particulier les surfaces sensibles essentiellement à proximité du patient.

**DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** permettent un temps d'application universel et court pour la désinfection et le nettoyage de surfaces de taille moyenne. Les lingettes peuvent être retirées individuellement de leur emballage flow pack refermable facile à utiliser.

**DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** sont basées sur l'association optimale de la lingette et de la solution de trempage. Ainsi elles offrent une désinfection efficace, tout en douceur en peu de temps.

### UTILISATIONS ET CONSEILS

#### Champs d'application

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB) : Désinfection rapide et nettoyage de tous types de surfaces et matériels médicaux essentiellement à proximité du patient. Convient pour une utilisation dans le domaine alimentaire.

Conformément au Règlement UE relatif aux dispositifs médicaux : Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs, en particulier également les surfaces sensibles des dispositifs médicaux.

#### Utilisation

Essuyer les surfaces avec **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** jusqu'au mouillage complet et laisser sécher pendant le temps d'action. Conformément au Règlement UE relatif aux dispositifs médicaux, les utilisateurs/patients sont tenus de notifier tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre européen dans lequel l'utilisateur/le patient est établi.

Fabriqué par :  
Dr. Schumacher GmbH.

#### Conseils d'utilisation

Durabilité après ouverture : 42 jours

#### Composition

100 g de solution contiennent : 45 g éthanol.

#### Compatibilité avec les matériaux

L'emploi est déconseillé pour les matériaux suivants : Polyméthylméthacrylate (PMMA), Aluminium. L'emploi avec les matériaux suivants n'est recommandé que sous certaines conditions : Laiton, Polyéthylène téréphtalate (PET).

#### Consignes de sécurité et avertissements

Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. En cas de contact avec les yeux rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans une entreprise de collecte agréée.

Pour usage professionnel seulement par un personnel possédant la compétence nécessaire et respectant les directives nationales.

#### Lire l'étiquette avant toute utilisation.

Importé par :  
**THX MEDICAL**  
ZAC Clapeloup - 1, rue des Roses  
F-69280 Sainte-Consoce  
Tél. +33(0)4 78 87 17 99  
[www.thxmedical.com](http://www.thxmedical.com)  
[info@thxmedical.com](mailto:info@thxmedical.com)

# DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

## SPECTRE ET TEMPS D'ACTION

### Recommandation d'application

			30 s	1 min	2 min	3 min
Bactéricide, levuricide**/**	EN 16615	avec action mécanique, conditions de saleté			•	
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	conditions de propreté	•			
	EN 14348	conditions de saleté		•		
mycobactéricide (M. avium)	EN 14348	conditions de propreté		•		
virucide limité PLUS	EN 14476	conditions de propreté				•
virucide limité	EN 14476	conditions de propreté et de saleté		•		

### Résultats de test supplémentaire

bactéricide	EN 13727	conditions de saleté		•		
	EN 16615	conditions de saleté			•	
	EN 13697	conditions de propreté et de saleté		•		
	EN 1276	conditions de saleté		•		
levuricide (C. albicans)	EN 13624	conditions de saleté		•		
	EN 16615	conditions de saleté			•	
	EN 13697	conditions de propreté et de saleté		•		
	EN 1650	conditions de saleté		•		
actif contre les norovirus (NVM)	EN 14476	conditions de saleté	•			
virucide limité	RKI / DVV	incl. HBV / HIV / HCV	•			
actif contre les rotavirus	EN 14476	conditions de propreté	•			
actif contre les adénovirus	EN 14476	conditions de propreté				•

\* y compris des tests de phase 2 étape 1 et phase 2 étape 2 (tests de suspension quantitative et essai quantitatif de porte germe) activité virucide limité RKI/DVV  
 \*\* listé VAH : 5 minutes

Produit	Conditionnement	Unité	Contenu	Dimensions des lingettes	Réf.
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES : PET	Boîte	9 packs	60 lingettes	20 x 22 cm	00-323DS-T060
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES : BIO	Boîte	6 packs	100 lingettes	20 x 20 cm	00-323DS-T100

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les informations nationales peuvent diverger. Pour de plus amples informations, prière de contacter notre filiale ou notre distributeur local.



Dr. Schumacher est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion de l'environnement validé en conformité avec l'EMAS et est membre de l'IHO, VCI, BAH, DGSV et auprès de DGKH.

Good Manufacturing Practice

Good Manufacturing Practice

Verband der Chemischen Industrie e.V.

EMAS

CE 0482

Fabriqué par :  
Dr. Schumacher GmbH.

Importé par :  
**THX MEDICAL**  
ZAC Clapeloup - 1, rue des Roses  
F-69280 Sainte-Consoce  
Tél. +33(0)4 78 87 17 99  
[www.thxmedical.com](http://www.thxmedical.com)  
[info@thxmedical.com](mailto:info@thxmedical.com)

