

Désinfectant rapide

DESCOCEPT SPEZIAL

Désinfection rapide sans alcool

- Particulièrement adapté pour les surfaces sensibles à l'alcool
- Forte puissance de nettoyage
- Court temps de contact



Description du produit

DESCOCEPT SPEZIAL est une préparation sans alcool, prête à l'emploi pour la désinfection et le nettoyage de matériels médicaux et de tout type de surfaces. Particulièrement adaptées aux dispositifs médicaux et aux surfaces sensibles à l'alcool également pour le verre acrylique. À base de composés d'ammonium quaternaires. DESCOCEPT SPEZIAL ne contient pas d'alcool, d'aldéhydes ni de phénols. Il présente en outre une odeur neutre.

Champs d'application

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB) : Désinfection et nettoyage des surfaces et de l'inventaire à usage médical.

Conformément à l'ordonnance sur les dispositifs médicaux : Désinfection et nettoyage de dispositifs médicaux non-invasifs.

Utilisation

Essuyer les surfaces avec DESCOCEPT SPEZIAL jusqu'au mouillage complet et laisser sécher pendant le temps d'action.

Conseils d'utilisation

DESCOCEPT SPEZIAL peut être utilisé comme désinfectant liquide ou moussant pour des surfaces. Utilisation en distributeurs de lingettes jetables : DESCOCEPT SPEZIAL convient par-

Spectre d'action et méthode de test			30 s	1 min	2 min
Bactéries et levures					
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, levuricide)*	VAH** / EN 16615	avec effet mécanique, contamination élevée			
Virus enveloppés					
efficace contre tous les virus enveloppés	RKI/DVV	incl. HBV/HIV/HCV	●		
	EN 14476	conditions de propreté	●		
Virus non enveloppés					
efficace contre les papova/ polyomavirus SV40	EN 14476	conditions de saleté			
efficace contre les rotavirus	RKI/DVV		●		

* y compris des essais de phase 2 niveau 1 et phase 2 niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais porte-germes en conditions pratiques)
** répertorié dans la colonne 5 min de la liste VAH

EN Normen			1 min
Spectre d'action et méthode de test			
bactéricide	EN 1040	Test de base	●
levuricide (Candida albicans)	EN 1275	Test de base	●
bactéricide (domaine médical)	EN 13727	conditions de saleté	●
levuricide (C. albicans, domaine médical)	EN 13624	conditions de saleté	●
bactéricide (secteur de l'alimentaire/secteur industriel)	EN 1276 / EN 13697	conditions de saleté	●
levuricide (C. albicans, secteur de l'alimentaire/secteur industriel)	EN 1650 / EN 13697	conditions de saleté	●

ticulièrement à une utilisation en systèmes de distributeur de lingettes jetables avec une performance de désinfection certifiée

et une durée d'utilisation de 28 jours maximum en systèmes de distributeur de lingettes jetables comme DESCO/ECO WIPES.

DESCOCEPT SPEZIAL

Désinfection rapide sans alcool

Composition

100 g de solution: 0,5 g Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium; 0,25 g chlorure de didécyldiméthyl ammonium.

Attestations

Nos produits sont intégralement contrôlés. Sur demande, nous mettons à votre disposition les dossiers des experts.

Consignes de sécurité et avertissements

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu/récipient dans une entreprise de collecte agréée.

Pour usage professionnel seulement.

Produit	Conditionnement	Contenu	Unité	Réf.
DESCOCEPT SPEZIAL	Flacon	750 ml	6	00-208-0075
	Flacon	1 L	10	00-208-010
	Bidon	5 L	3	00-208-050

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com