

EXAWIPES

Préparation du système

+ D'INFORMATIONS SUR :
www.thxmedical.com

1



Ouvrir le couvercle du distributeur de chiffonnettes humides.

5



Faire sortir la première chiffonnette, en partant du centre du rouleau et en faire passer une extrémité par l'orifice de sortie en étoile.

2



Sortir le rouleau de chiffonnettes de son emballage et le mettre dans le distributeur.
Attention : auparavant, enlever l'étiquette de traçabilité qui se trouve dans le rouleau ou sur son emballage.

6



Fermer le couvercle de protection de l'orifice de sortie des chiffonnettes en faisant attention que la chiffonnette sortante soit bien recouverte.

3



Préparer 2 litres de solution désinfectante à la concentration souhaitée en respectant les indications du fabricant.

7



Réaliser quelques « allers et retours » en soulevant le seau et en le retournant totalement (tête en bas). Conserver cette position quelques secondes afin de bien humidifier l'ensemble du rouleau.

4



Verser la préparation lentement dans le distributeur sur le rouleau.

8



Coller l'étiquette autocollante jointe aux chiffonnettes et y inscrire le nom du produit, sa concentration, la durée d'efficacité, le N° de lot, la date de préparation et la date de péremption.

Remplissage ultérieur du seau distributeur après usage.

Le distributeur de chiffonnettes humides peut naturellement être réutilisé. L'étiquette de traçabilité se trouvant sur le distributeur doit en être ôtée pour être remplacée par une nouvelle.

Avant de remplir à nouveau le distributeur, il faut le nettoyer et le désinfecter.

Il est conseillé de renouveler les seaux régulièrement à la fréquence d'une fois par an.