

# EXAWIPES O/DO

## Préparation du système

1



Ouvrir le couvercle du distributeur de chiffonnettes humides.

2



Enlever l'étiquette de traçabilité qui se trouve sur l'emballage plastique du rouleau et la positionner sur le bouchon. Sortir le rouleau de chiffonnettes de son emballage et le mettre dans le seau.

3



Préparer 2 litres de solution à la concentration souhaitée en respectant les indications du fabricant.

4



Verser la préparation lentement dans le distributeur sur le rouleau.

5



Faire sortir la première chiffonnette, en partant du centre du rouleau et en faire passer une extrémité par l'orifice de sortie en étoile.

6



Fermer le couvercle de protection de l'orifice de sortie des chiffonnettes en faisant attention que la chiffonnette sortante soit bien recouverte. Maintenir le couvercle fermé lorsqu'on ne prend pas de chiffonnettes.

7



Inscrire le nom du produit, la date de préparation et la date de péremption.

EPI :  
Port des Gants

PLUS D'INFORMATIONS SUR :  
[www.thxmedical.com](http://www.thxmedical.com)

## Remplissage ultérieur du seau distributeur.

Le distributeur de chiffonnettes humides peut naturellement être réutilisé.

L'étiquette de lot se trouvant sur le distributeur doit en être ôtée pour être remplacée par une nouvelle. Avant de remplir à nouveau le distributeur, il faut le nettoyer à fond ; ce qui peut se faire soit à la main à l'aide d'un spray désinfectant, soit en machine (max. 60°). Le nettoyage peut également être réalisé en utilisant une chiffonnette humide provenant d'un autre seau si tant est qu'il s'agisse du même type de désinfectant. Si l'on utilise un autre produit, on doit prendre un produit à base d'agents tensio-actifs non ionogène. Le seau peut également être plongé périodiquement dans un produit désinfectant pendant 15 minutes.

Il est conseillé de renouveler les seaux régulièrement à la fréquence d'une fois par an.

