

ROULEAU de 30 chiffonnettes à usage unique Super Eco Wipes M (sans produit DD) Super Eco Wipes MO (avec Optisal Plus) Format 30_{cm} x 30_{cm}

Type de produit

Chiffonnettes d'essuyage sèches à imprégner d'agents désinfectants pour la désinfection et le nettoyage rapides et simples des surfaces et dispositifs médicaux. Les lingettes sont en non tissé non pelucheux de haute qualité.

Les chiffonnettes **Super Eco Wipes M** ont été conçus spécialement pour la désinfection des surfaces. Le matériau utilisé restitué à la perfection la solution désinfectante, et assure un pouvoir mouillant des surfaces à désinfecter très efficace.

Les chiffonnettes **Super Eco Wipes M** peuvent être extraites d'un distributeur de chiffonnettes **Distri wipes** conçu spécialement à cet effet. Très pratique et qui peut être refermé hermétiquement.

Domaines d'application

Désinfection et nettoyage rapides et simples des surfaces, des matériels et dispositifs à usage médical ainsi que des surfaces nécessitant un haut degré d'hygiène (Industrie alimentaire).

Utilisation

Préparer 1 litre de solution prête à l'emploi de l'agent désinfectant souhaité (voir les indications du fabricant pour les concentrations d'emploi et le temps d'action) ou utilisez le sachet dose de 20ml de **Optisal Plus** si vous avez commandé des Super Eco Wipes MO.

Puis imbiber les chiffonnettes dans le seau de distribution en utilisant un Becher gradué verseur. Dans ces conditions l'utilisation des chiffonnettes peut être instantanée.

Essuyer soigneusement les surfaces et objets. Observer le temps d'action du produit désinfectant !

Le **temps de stockage limite** de nos désinfectants prêts à l'emploi a été évalué. Le temps de stockage est d'au moins 28 jours. Les chiffonnettes **Super Eco Wipes M** peuvent être détachées une par une.


Elles doivent être extraites à l'unité du seau distributeur par l'ouverture prévue. Les chiffonnettes suivantes restent protégées dans le récipient grâce au couvercle du système distributeur.

Le cas échéant, nettoyer le système distributeur, avant le remplacement du rouleau de lingettes. (Voir condition de nettoyage du seau de distribution)

Pour remettre un nouveau rouleau de chiffonnettes, ôter le couvercle, y placer le rouleau de chiffonnettes et tirer le début du rouleau par le centre de celui-ci en faisant passer les chiffonnettes

Chiffonnettes d'essuyage sèches

CE

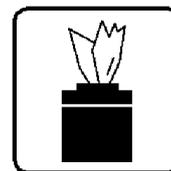

par l'ouverture du seau distributeur.

Des étiquettes spéciales pour l'indication de la concentration et des dates de préparation et de péremption de l'agent désinfectant correspondant sont disponibles.

Composition

1 rouleau comprend 30 chiffonnettes d'essuyage de 30 cm x 30 cm, sèches, en non tissé non pelucheux de haute qualité. 100% Polyester (Grammage 60 gr/M²) et un sachet dose de 20ml Optisal Plus (Super Eco Wipes MO)

Présentation

Conditionnement	Unité	Réf.
1 Carton de 6 rouleaux de 30 feuilles de Super Eco Wipes M (sans produit DD)	6 x 1 rouleau	00-910SEW3006M
1 Carton de 6 rouleaux de 30 feuilles de Super Eco Wipes MO Avec sachet dose 20ml Optisal Plus	6x1 rouleau	00-910SEW3006MO

SEAU Distributeur

Seau distributeur de chiffonnettes pouvant être refermé

Type de produit

Seau de distribution, en polyéthylène et polypropylène, conçu spécialement pour la préparation, le stockage et la distribution hygiéniques de chiffonnettes humides. La distribution se fait par un système distributeur de chiffonnettes absolument étanche qui peut se refermer et conçu spécialement pour cet emploi.

Lavable en machine jusqu'à 60° C. la décontamination du seau s'effectue à l'aide d'une chiffonnette humide imprégnée de décontaminant.

Une étiquette spéciale de traçabilité permettant l'enregistrement de la concentration ainsi que les dates de préparation et de péremption est fournie avec chaque nouveau rouleau.

Présentation

Conditionnement	Unité de vente	Réf.
Un par paquet Seau distributeur pour SEW M et MO	1 x 1 seau	00-910SD-M

THX MEDICAL
125, impasse du belvedere
69280 MARCY L'ETOILE
Tel: ++33(0)4 78 87 17 99