

ROULEAU de 90 chiffonnettes à usage unique EXAWIPES C avec Cleanisept Format 32cm X 30cm

Chiffonnettes en non tissé à imbiber avec sachet dose 25ml de Cleanisept

Type de produit

Chiffonnettes d'essuyage sèches à imbiber pour la désinfection et le nettoyage rapides et simples des surfaces et dispositifs médicaux. Les lingettes sont en non tissé non pelucheux de haute qualité.

Les chiffonnettes **EXAWIPES C** ont été conçus **spécialement pour la désinfection des surfaces**. Le matériau utilisé restitue à la perfection la solution désinfectante, et assure un pouvoir mouillant des surfaces à désinfecter très efficace (jusqu'à 5 m²).

Les chiffonnettes **EXAWIPES C** peuvent être extraites d'un **distributeur de chiffonnettes Distri wipes** conçu spécialement à cet effet. Très pratique et qui peut être refermé hermétiquement.

Domaines d'application

Désinfection et nettoyage rapides et simples des surfaces, des matériels et dispositifs à usage médical ainsi que des surfaces nécessitant un haut degré d'hygiène (Industrie alimentaire).

Utilisation

Préparer 2 litres de solution prête à l'emploi de l'agent désinfectant Cleanisept.

Puis imbiber les chiffonnettes dans le seau de distribution en utilisant un Becher gradué verseur. Dans ces conditions, l'utilisation des chiffonnettes peut être instantanée.

La durée d'utilisation maximale après reconstitution et humidification est de 28 jours.

Essuyer soigneusement les surfaces et objets. Observer le temps d'action du produit désinfectant !

Les chiffonnettes **EXAWIPES C** peuvent être détachées une par une. Elles doivent être extraites à l'unité du seau distributeur par l'ouverture prévue. Les chiffonnettes suivantes restent protégées dans le récipient grâce au couvercle du système distributeur.

Le cas échéant, nettoyer le système distributeur, avant le remplacement du rouleau de lingettes. (Voir condition de nettoyage du seau de distribution)

Pour remettre un nouveau rouleau de chiffonnettes, ôter le couvercle, y placer le rouleau de chiffonnettes et tirer le début du rouleau par le centre de celui-ci en faisant passer les chiffonnettes par l'ouverture du seau distributeur.

Des étiquettes spéciales pour l'indication de la concentration et des dates de préparation et de péremption de l'agent désinfectant correspondant sont livrées avec la recharge.

Chiffonnettes d'essuyage sèches

CE



Composition

1 rouleau comprend 90 chiffonnettes d'essuyage de 32 cm x 30 cm, sèches, en non tissé non pelucheux de haute qualité. 100% Polyester (Grammage 50 gr/M²)

Présentation

Conditionnement	Unité	Réf.
1 Carton de 6 recharges de 90 chiff. Exawipes C		
6 x 1 recharges		00-910EXA9006C

SEAU Distributeur réutilisable pour Chiffonnettes

Seau distributeur de chiffonnettes pouvant être refermé

Type de produit

Seau de distribution, en polyéthylène et polypropylène, conçu spécialement pour la préparation, le stockage et la distribution hygiéniques de chiffonnettes humides. La distribution se fait par un système distributeur de chiffonnettes absolument étanche qui peut se refermer et conçu spécialement pour cet emploi.

Lavable en machine jusqu'à 60° C. la décontamination du seau s'effectue à l'aide d'une chiffonnette humide imprégnée de décontaminant.

Une étiquette spéciale de traçabilité permettant l'enregistrement de la concentration ainsi que les dates de préparation et de péremption est fournie avec chaque nouveau rouleau.

Présentation

Conditionnement	Unité de vente	Réf.
Seau blanc (couvercle vert)	1x1 seau	TH-201-SDV-01
Seau blanc (couvercle violet)	1x1 seau	TH-202-SDF-01
Seau blanc (couvercle vert)	1x6 seaux	TH-201-SDV-06
Seau blanc (couvercle violet)	1x6 seaux	TH-202-SDF-06

BECHER Gradué 0 – 3000mL

Type de produit

Becher gradué en polypropylène autoclavable
Contenance 3000ml Avec anse et bec verseur
Conçu pour la préparation de la solution désinfectante

Présentation

Conditionnement	Unité	Réf.
1 par paquet		
BECHER Gradué 3000 mL	1x1 unité	00-1159-BC3

THX MEDICAL
1 rue des Roses
ZA CLAPELOUP
69280 Sainte Cosmance
Tel: ++33(0)4 78 87 17 99