



Lingettes désinfectantes

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

Lingettes imbibées d'alcool pour la désinfection rapide

- Utilisation universelle, pratique et rapide
- Efficacité complète, rapide
- Convient particulièrement à la désinfection de surfaces de taille moyenne dans des zones proches du patient



Description du produit

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sont des lingettes à l'alcool prêtes à l'emploi, pour la désinfection et le nettoyage de surface de dispositifs médicaux, en particulier les surfaces sensibles essentiellement à proximité du patient.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES permettent un temps d'application universel et court pour la désinfection et le nettoyage de surfaces de taille moyenne. Les lingettes peuvent être retirées individuellement de leur emballage flow pack refermable facile à utiliser.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sont basées sur l'association optimale de la lingette et de la solution de trempage. Ainsi elles offrent une désinfection efficace, tout en douceur en peu de temps.

Champs d'application:

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB) : Désinfection rapide et nettoyage de tout types de surfaces et matériels médicaux essentiellement à proximité du patient.

Conformément à l'ordonnance sur les dispositifs médicaux : Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs, en particulier également les surfaces sensibles des dispositifs médicaux.

Spectre et temps d'action			30 s	1 min	2 min	3 min
Recommandation d'application						
recommandation d'application pour la désinfection des surfaces : Bactéricide, levuricide*	VAH/ EN 16615	avec action mécanique, conditions de saleté			●	
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	conditions de propreté	●			
mycobactéricide (M. avium)	EN 14348	conditions de propreté		●		
virucide limité PLUS	EN 14476	conditions de propreté				●
virucide limité	EN 14476	conditions de propreté et de saleté		●		
Résultats de test supplémentaire						
bactéricide	EN 13727	conditions de propreté et de saleté		●		
	EN 16615	conditions de saleté			●	
levuricide (C. albicans)	EN 13624	conditions de propreté et de saleté		●		
	EN 16615	conditions de saleté			●	
actif contre les norovirus (NVM)	EN 14476	conditions de propreté		●		
		conditions de saleté	●			
virucide limité	RKI/DV	incl. VHB/VH/VHC	●			
actif contre les rotavirus	EN 14476	conditions de propreté	●			
actif contre les adénovirus	EN 14476	conditions de propreté				●

* y compris des tests de phase 2 étape 1 et phase 2 étape 2 (tests de suspension quantitative et essai quantitatif de porte germe) activité virucide limité RKI/DV



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

Lingettes imbibées d'alcool pour la désinfection rapide

Utilisation

Essuyer les surfaces avec **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** jusqu'au mouillage complet et laisser sécher pendant le temps d'action.

Conformément au Règlement UE relatif aux dispositifs médicaux, les utilisateurs/patients sont tenus de notifier tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre européen dans lequel l'utilisateur/le patient est établi.

Conseils d'utilisation

Durabilité après ouverture : 42 jours.

Composition

100 g de solution contiennent :
45 g d'éthanol.

Compatibilité avec les matériaux

L'emploi de **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** est déconseillé pour les matériaux suivants : Aluminium, Polyméthylméthacrylate (PMMA). L'emploi de **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** avec les matériaux suivants n'est recommandé que sous certaines conditions : Laiton, Polyéthylène téréphtalate (PET).

Attestations

Nos produits sont intégralement contrôlés. Sur demande, nous mettons à votre disposition les rapports des experts.

Consignes de sécurité et avertissements

Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans une entreprise de collecte agréée.

Pour usage professionnel seulement par un personnel possédant la compétence nécessaire et respectant les directives nationales.

Lire l'étiquette avant toute utilisation.

Produit	Unité individuelle	Contenu	Unité de livraison	Taille	Référence
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	paquet	60 lingettes	9	20 x 22 cm	00-323DS-T060E

CE 0482

Les produits et emballages seront disponibles à condition de bénéficier d'un enregistrement national.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dr. Schumacher est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion de l'environnement validé en conformité avec l'EMAS et est membre de l'IHO, VCI, BAH, DGSV et auprès de DGKH. www.schumacher-online.com

