

DOSAMAT

Digital 2.0

Ref : 00-911-FR

2 volumes pour 2 concentrations

Distributeur/doseur programmable
de grande précision pour solutions
désinfectantes et détergentes
(toutes marques)



Application

Distributeur doseur indépendant pour la préparation de solutions désinfectantes prêtes à l'emploi. Application de 0.25% à 10%.
(Non approprié avec les désinfectants à base de chlorure ou d'acide péruacétique.)

Technique de dosage

Technique de dosage décentralisée, contrôlé électroniquement par microprocesseur, utilisé dans la préparation de désinfectants et nettoyants prêts à l'emploi.

Il permet automatiquement le remplissage de 2 volumes. Les canaux « eau » et « produit concentré » sont distincts. Une carte électronique assure la gestion des deux flux en tenant compte du ratio à appliquer selon la programmation réalisée antérieurement. L'électronique gère également le remplissage avec arrêt automatique en comptabilisant le volume écoulé. DOSAMAT Digital représente une grande innovation et possède un grand nombre d'avantages.

Sa forme compacte et réduite permet une installation même dans des endroits très étroits.

Fonctions

- Utilisation simple grâce au système de réglage digital
- Réglage de 2 volumes de remplissage distincts avec arrêt automatique
- Réglage de 2 taux de concentration distincts
- Dosage : 0,25-10 % librement programmable,
- Circuits distincts (eau et produit)
- Volume présélectionné : de 0.5 à 60 litres
- Contrôle du taux de concentration simple et rapide à l'aide d'un Becher gradué.
(Contrôle volumétrique)
- Composants de haute qualité
- Maintenance aisée sans cout additionnel, peut être effectuée par le service technique de l'établissement
- Séparation du système pour la protection de l'eau potable conformément à la norme EN1717

Fabrication du boîtier

DOSAMAT Digital 2.0 est équipé d'un carter en acier inoxydable muni d'une porte pouvant être verrouillée. Également disponible comme double appareil.

Données techniques

Débit prélevé	15l/min max.
Pression d'écoulement	1,5 bar min. 7 bar max.
Prise minimum	0.5 litre
Plage de tolérance du taux de dosage pré réglé	+6 % max.
Capacité du récipient pour concentré	Bidon de 5 litres
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Tension de commande	24V
Puissance	50 W / 10W
Câble d'alimentation	Fiche à contact de protection, longueur 1,3 m.
Dimensions	300 x 200 x 180 mm + bidon de 5 l à dr. ou à g.
Poids	8 Kg (sans réservoir de produit)
Nuisances sonores en fonctionnement	65 Db
Raccord pour eau	Filet mâle 15/21
Sortie eau	Flexible 150cm (double canaux) Et/ou col de cygne
Attentes techniques	Voir descriptif

Sous réserve de modifications techniques de notre part

Mise à jour : 02/2021