

## Désinfection de surfaces

# OPTISAL® PLUS

concentré liquide pour le nettoyage  
et la désinfection de surfaces

- champ d'action complet
- excellente action nettoyante
- excellente compatibilité avec les matériaux



CE 0482

### Type de préparation

OPTISAL® PLUS est un concentré liquide pour la désinfection et le nettoyage des surfaces et des zones proches du patient ainsi que des dispositifs médicaux non invasifs. Le produit peut être utilisé de façon universelle pour la désinfection et le nettoyage de surfaces dans le domaine médical.

OPTISAL® PLUS se distingue par une performance élevée de nettoyage et par un champ d'action spécialement conçu pour une utilisation au quotidien. En plus de son efficacité contre tous les virus enveloppés (VHB, VIH, VHC), OPTISAL® PLUS présente une efficacité exceptionnelle contre les virus non enveloppés comme les adénovirus, les norovirus et les rotavirus. OPTISAL® PLUS présente également une bonne efficacité contre les mycobactéries et les moisissures.

Sa composition novatrice garantit un séchage sans traces lors de son utilisation.

OPTISAL® PLUS est sans odeur et sans parfum.

### Champs d'application

**Selon la LDM :** convient à la désinfection et au nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs.

**Selon le règlement sur les produits biocides :** convient à la désinfection et au nettoyage de surfaces et du matériel dans les zones médicales, industrielles, privées et publiques.

### Spectre d'action

Spectrum of efficacy and contact times			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
<b>Bacteria and yeasts</b>							
application recommendation for surface disinfection: Bactericidal, yeasticidal*	VAH/ EN 16615	with mechanical action, dirty conditions	2.5 %	1.5 %	1 %	0.5 %	
tuberculocidal (M.terrae)	EN 14348	dirty conditions				1.5 %	
		clean conditions					0.5 %
fungicidal (Aspergillus brasiliensis)	VAH	dirty conditions				3 %	
<b>Enveloped viruses</b>							
active against enveloped viruses	RKI/DVV	incl. HBV/HIV/HCV	1 %			0.5 %	
<b>Non-enveloped viruses</b>							
active against noroviruses (MNV)	EN 14476	clean conditions	2 %	1 %		0.5 %	
		dirty conditions	2 %	1 %			
active against adenoviruses	EN 14476	clean conditions		2 %		1 %	
		dirty conditions			2 %	1 %	
active against rotaviruses	EN 14476	clean conditions	0.5 %				
<b>Additional test results</b>			<b>1 min</b>	<b>5 min</b>	<b>60 min</b>	<b>240 min</b>	
bactericidal	EN 13727	dirty conditions		0.25 %			
yeasticidal (C. albicans)	EN 13624	dirty conditions	0.25 %				

\*including phase 2 step 1 and phase 2 step 2 tests (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)



## Désinfection de surfaces

# OPTISAL® PLUS

concentré liquide pour le nettoyage et la désinfection de surfaces

### Utilisation

**Désinfection de surfaces :** Mouiller les surfaces à désinfecter avec une quantité suffisante de solution prête à l'emploi de **OPTISAL® PLUS** et répartir le produit mécaniquement (désinfection par friction/essuyage). **OPTISAL® PLUS** est particulièrement bien adapté à une utilisation avec un chiffon.

**Indication :** Ne pas utiliser **OPTISAL® PLUS** en lien direct avec des produits contenant des aldéhydes.

Utilisation en distributeur de lingettes :

OPTISAL PLUS convient particulièrement à une utilisation en système de distribution de lingettes jetables avec une performance certifiée et une durée d'utilisation de 42 jours maximum avec ONE SYSTEM et une durée d'utilisation de 28 jours maximum avec les distributeurs ECO WIPES.

### Compatibilité avec les matériaux

Compatible avec les métaux, les alliages métalliques, les revêtements de sol comme le PVC, le linoléum, la faïence, le carrelage entre autres ainsi que matières synthétiques (PMMA, POM, PP, PE, PA, PS), caoutchouc et silicone. Ne pas utiliser sur des matériaux comme le polycarbonate et les matériaux poreux comme les surfaces en bois non traitées et vernies.

### Composition

**100 g contiennent :**

6,6 g chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammoniumchlorid

2,3 g chlorure de didécyldiméthylammonium : 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

Contient : < 5 % de tensioactifs non ioniques

Single unit	Content	Delivery unit	REF
sachet	20ml	300	00-245-0002
dosage bottle	1 L	10	00-245-010
container	5 L	3	00-245-050

### Caractéristiques physico-chimiques

**Apparence :** liquide bleu, clair

**pH :** 11 env.

### Remarques spéciales

Peut irriter les voies respiratoires. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTI-POISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans des agrées de collecte entreprise élimination ou de locaux.

### Statut du produit/ Listes

Répertorié dans la liste VAH sur la désinfection de surfaces

Répertorié dans la liste IHO sur les virucides ([www.ihoviruzidie-liste.de](http://www.ihoviruzidie-liste.de)).

Enregistré comme produit biocide auprès du BauA

(Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail), conformément à la loi sur les biocides : No d'enregistrement BauA: N-59480

Conforme à la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux

### Expertises

**Dr. F.-A. Pitten**, hygiéniste, Gießen : Certificat relatif à la désinfection de surfaces conformément aux directives DGHM/VAH.

**Dr. J. Steinmann**, virologue, Brême : Certificat d'efficacité contre les NVM (noro), les adénovirus et les rotavirus conformément à EN 14476. Certificat d'efficacité contre les virus VDVB et virus de la vaccine conformément à la directive RKI/DVV 2008.

**Dr. T. Koburger**, hygiéniste, Greifswald : Certificat d'efficacité fongicide Aspergillus brasiliensis.

### Informations environnementales

Les produits de Dr. Schumacher GmbH sont fabriqués selon des procédés modernes, sûrs et respectueux de l'environnement. Le respect de normes de qualité élevées garantit la fabrication de produits de très bonne qualité, toujours homogène.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



La société Dr. Schumacher GmbH est homologuée selon les normes DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et BS OHSAS 18001 et dispose d'un système de management environnemental validé (selon SMEA). Nous sommes membres de IHO, VCI, BAH, DGSV et DGKH.