

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

LINGETTES SANS ALCOOL POUR UNE DÉSINFECTION RAPIDE
DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX SENSIBLES

1/9

Formule sans alcool : idéale pour les surfaces délicates comme les sondes d'échographie abdominales.

Homologation par un grand nombre de fabricants de sondes (liste au verso)

Action rapide : efficacité prouvée contre une large gamme de micro-organismes.

Utilisation universelle : convient aux équipements médicaux, environnements paramédicaux et vétérinaires.

Confort d'utilisation : lingettes prêtes à l'emploi.



DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

DESCRIPTION DU PRODUIT

2 / 9

Les lingettes **CLEANISEPT WIPES** sont des lingettes désinfectantes sans alcool, prêtes à l'emploi, destinées à la désinfection et au nettoyage rapides des dispositifs médicaux et des équipements médicaux. Les lingettes ont une durée de conservation de **90 jours après ouverture du paquet**.

Les lingettes **CLEANISEPT WIPES** permettent une application rapide et facile, en particulier pour la désinfection et le nettoyage des sondes à ultrasons sans contact avec les muqueuses. Elles sont sans alcool et ne contiennent ni aldéhydes ni phénols.

APPLICATIONS ET REMARQUES

Conforme au règlement sur les produits biocides (BPR)

Pour la désinfection et le nettoyage rapides des équipements médicaux sensibles à l'alcool et des surfaces de tout type.

Conforme au règlement européen sur les dispositifs médicaux

Pour la désinfection et le nettoyage rapides des dispositifs médicaux non invasifs sensibles à l'alcool, ainsi que des sondes à ultrasons pour les examens abdominaux.

Application

Essuyez les surfaces avec **CLEANISEPT WIPES MAXI** jusqu'à ce qu'elles soient complètement humides et maintenez-les humides pendant toute la durée de contact.

Les dispositifs médicaux qui entrent en contact avec la peau lors de leur utilisation prévue doivent être rincés pendant 15 secondes sous l'eau courante de qualité appropriée après expiration du temps d'exposition.

Conformément au règlement européen sur les dispositifs médicaux, les utilisateurs/patients sont tenus de signaler tout incident grave survenu en relation avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE dans lequel l'utilisateur/le patient est établi.

Remarques d'application

Durée de conservation après ouverture : 90 jours

Composition

100 g de solution contiennent : 0,5 g de chlorure d'alkyl(C12-16) diméthylbenzylammonium, 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium.

Compatibilité des matériaux

Large gamme d'applications sur les surfaces et les dispositifs médicaux. (voir pages 4 à 7)

Statut du produit

Double enregistrement (dispositif médical/biocide)

Les lingettes **CLEANISEPT WIPES** sont idéales pour désinfecter et nettoyer les surfaces de taille moyenne dans les zones de routine grâce à leur grande taille. Les lingettes peuvent être retirées individuellement de leur emballage refermable et facile à utiliser.

Homologation par le fabricant

Les lingettes **CLEANISEPT WIPES** sont recommandées pour la désinfection des appareils à ultrasons et des têtes à ultrasons des fabricants suivants :

- Canon Medical/Toshiba
- Fujifilm/SonoSite/Aloka/Hitachi
- Samsung
- Siemens
- esaote
- Philips
- Olympus
- GE Healthcare

Les lingettes Cleanisept sont recommandées pour la désinfection des appareils médicaux des fabricants suivants :

- Skai
- Hackebeil GmbH
- Honeywell
- Dr Paul Koch

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux informations sur le produit fournies par le fabricant ou contacter votre conseiller clientèle THX MEDICAL.

Mises en garde et mentions de danger

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient auprès d'une entreprise d'élimination agréée ou d'un centre de collecte local.

Réservé à l'usage professionnel par du personnel disposant des connaissances spécialisées correspondantes conformément aux directives nationales.

Utiliser les désinfectants en toute sécurité.

Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

**CLEANISEPT®
WIPES MAXI**



PRÉVENIR

SPECTRE D'EFFICACITÉ ET TEMPS DE CONTACT

3 / 9



SPECTRE D'EFFICACITÉ ET TEMPS DE CONTACT			1 min	2 min
Recommandations d'application pour la désinfection des surfaces				
Bactéricide, levuricide ¹	VAH/EN ²	avec action mécanique, conditions de saleté	•	
Actif contre les virus enveloppés	EN 14476	conditions de propreté et de saleté	•	
Résultats de tests supplémentaires				
Bactéricide	EN 16615	conditions de saleté	•	
	EN 13727	conditions de saleté	•	
	EN 1276	conditions de saleté	•	
Levuricide (C. albicans)	EN 16615	conditions de saleté	•	
	EN 13624	conditions de saleté	•	
	EN 1650	conditions de saleté	•	
Actif contre les virus papova/SV40	EN 14476	conditions de saleté		•

¹ – y compris les tests de phase 2 étape 1 et de phase 2 étape 2 (tests quantitatifs en suspension et tests quantitatifs sur support)
² – EN 16615, EN 13727, EN 13624

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

4/9



MATÉRIAUX MÉTAUX	Non recommandé	Limité recommandé	Recommandé	APPLICATION EXEMPLE DE PRODUIT
Acier inoxydable V2A			● Fauteuils de transport médical ● Chariots de transport ● Déambulateurs	
Aluminium			●	
Laiton	●			Stéthoscopes (laiton chromé)
Cuivre	●			

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

5/9



MATÉRIAUX PLASTIQUES : ELASTOMÈRES	Non recommandé	Limité recommandé	Recommandé	APPLICATION EXEMPLE DE PRODUIT
PUR (polyuréthane)			•	Fauteuils de transport médical
			•	Tableaux de bord
Silicones			•	Masques faciaux
			•	Masques faciaux à bord ouvert
			•	Claviers et souris médicaux
EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène (monomère))		•		Chariots de soins infirmiers
CR (néoprène)		•		

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

6 / 9



MATÉRIAUX PLASTIQUES : THERMOPLASTIQUES	Non recommandé	Limité recommandé	Recommandé	APPLICATION EXEMPLE DE PRODUIT
PA (polyamide)			●	Tabliers de protection contre les rayons X
PE-HD (polyéthylène haute densité)			●	Conteneurs de stockage et de transport
PVC (polychlorure de vinyle)			●	
PMMA (polyméthacrylate de méthyle)			●	Acrylique et plexiglas, incubateurs
POM (polyoxyméthylène)			●	Chaises en plastique
PSU (polysulfone)			●	
EPP (polypropylène expansé (mousse))			●	Rouleaux de fascia
PC (polycarbonate, par exemple Makrolon)		●		Pompes à seringue
		●		Appareils à ultrasons
ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)		●		Équipement radiographique
		●		Moniteurs de surveillance des patients

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

7 / 9



MATÉRIAUX TEXTILES				APPLICATION EXEMPLE DE PRODUIT
	Non recommandé	Limité recommandé	Recommandé	
cuir synthétique (par exemple avec couche supérieure en PVC et PUR)		•		Tables d'examen et de traitement
		•		Aides au positionnement
		•		Fauteuils d'examen gynécologique
		•		Fauteuils dentaires
		•		Tables d'opération
		•		Brancards de transport de patients

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

RÉFÉRENCES PRODUITS

8/9

Produit	Conditionnement	Unité	Contenu	Dimensions	Réf.
 CLEANISEPT WIPES MAXI	Sachet souple	6	100 lingettes	20x22 cm	00-208-T100
 SUPPORT MURAL INOX POUR 00-208-T080	Boite	1	NA	env.105x120 mm	1421265
 CLEANISEPT WIPES	Boite plastique	12	100 lingettes	env. 14 x 20 cm	00-208-D020
 SUPPORT MURAL INOX POUR 00-208-D020	Boite	1	NA	env. 90x170 cm	00-902-DH
 CLEANISEPT SACHET LIQUID	Unité	1	25 ml	N/A	00-204-00025

Les informations nationales peuvent varier. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre filiale ou votre revendeur local.
La disponibilité des produits et les tailles des contenants dépendent de l'enregistrement national.



CE 0482

CERTIFICATIONS



Indicateurs de certifications et pratiques

Dr. Schumacher est certifié selon les normes DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion environnementale validé selon EMAS et est membre de l'IHO, du VCI, du BAH, du DGSV et du DGKH.

DÉSINFECTANT DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

CLEANISEPT® WIPES MAXI



PRÉVENIR

APERÇU DE LA GAMME DE PRODUITS

9/9



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT CONCENTRE LIQUIDE

À utiliser avec système rechargeable de chiffonnettes à usage unique EXAWIPES pour surfaces hautes et équipement médicaux en zones à risques.



EXAWIPES

